

GÉNÉRATEURS DE RADIOFRÉQUENCE



La société Sutter:

Fondée en 1970 à Fribourg en Brisgoue, Allemagne. Plus de 40 ans d'expérience dans le développement de produits de haute qualité. Leader sur le marché des pinces électriques bipolaires SuperGliss® non-stick.


**PRECISION
ELECTROSURGERY**

Made in Germany

GÉNÉRATEURS DE RADIOFRÉQUENCE


La technologie de 4 MHz

4 MHz technology

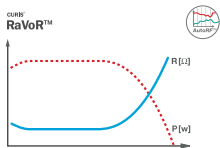


Exemple: mode RaVoR™



Grâce à la puissance impulsée, les tissus coagulés ont le temps, entre les différentes impulsions d'énergie, d'absorber et de répartir l'énergie appliquée

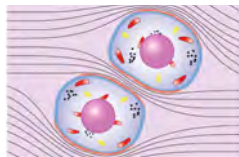

Électrochirurgie de haute fréquence conventionnelle: Répartition des lignes de champ dans le cas de courants basse fréquence. Le champ électromagnétique se concentre entre les cellules et agit sur elles de l'extérieur.

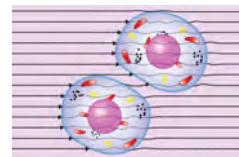

CURIS® 4 MHz: Dès que les membranes cellulaires sont franchies par la radiofréquence, l'énergie pénètre de façon homogène à l'intérieur des cellules. Il s'ensuit un effet très ciblé.

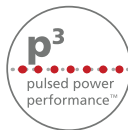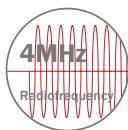

Générateur microchirurgical de radiofréquence 4 MHz

Radiofrequency generator 4 MHz

CURIS®

Pour toute chirurgie ORL, chirurgie plastique, neurologique, dermatologique - Livré complet avec ses accessoires
Générateur radiofréquence multifonctions

> Set de base CURIS® avec plaques neutres usage unique comprenant :

| Désignation | Réf. |
|---|-----------|
| Générateur de radiofréquence CURIS® | 360100-01 |
| Commande au pied 2 pédales CURIS®, long. de câble 4 m | 360110 |
| Câble bipolaire CURIS®, long. 3 m | 370154L |
| Manche monopolaire, ø 2,4 mm, long. de câble 3 m | 360704 |
| Plaque usage unique | |
| Câble de raccordement pour plaques neutres à usage unique, longueur 3 m | 360238 |
| Plaques neutres à usage unique, 50 unités | 360222 |
| Ou plaque réutilisable | |
| Plaque neutre réutilisable avec cordon | 360226 |



Set RaVoR®

RaVoR® set

> Traitement du ronflement et des cornets nasals comprenant :

| Désignation | Réf. |
|---------------------------------------|--------|
| Électrode bipolaire "Binner" cornet | 700462 |
| Électrode bipolaire voile palais | 700495 |
| Électrode bipolaire pilier postérieur | 700496 |
| Micro aiguille courbe mono, 30 mm | 360328 |
| Micro aiguille courbe mono, 65 mm | 360342 |

> Boîte (container)

| Désignation | Dim. ext. | Réf. |
|-----------------------------------|-------------------|--------|
| Container | 31 x 19 x H 10 cm | 800000 |
| Plateau électrodes pour container | 28 x 18 x H 8 cm | 701747 |



> Boîte (plateau) pinces


| Désignation | Dim. ext. | Réf. |
|---|------------------|--------|
| Boîte (plateau) 2 pinces avec couvercle | 30 x 7 x H 5 cm | 701724 |
| Boîte (plateau) 5 pinces avec couvercle | 30 x 14 x H 5 cm | 701764 |



Stérile

Électrodes RaVoR® à usage unique

RaVoR® electrodes

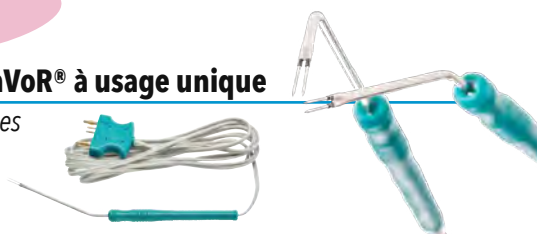

> Traitement du ronflement et des cornets nasals à usage unique pour CURIS®

> Électrode RaVoR® à usage unique «Binner» cornet pour CURIS® (boîte de 5) Réf.: 704462

> Électrode RaVoR® à usage unique voile palais à usage unique pour CURIS® (boîte de 5) Réf.: 704495

INSTRUMENTS DE RADIOFRÉQUENCE

Calvian endo-pen® coagulation bipolaire


Calvian endo-pen®. bipolar coagulation

Longueur 30 cm, longueur de travail* 18 cm

Action unique, bec de canard (vertical)

> Calvian endo-pen® 18 cm, 2,5 mm, embouts coudés à 45°, sans aspiration

Réf.: 700950

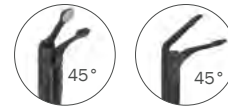

Action unique, bec de canard (vertical)

> Calvian endo-pen® 18 cm, 2,5 mm, embouts coudés à 15°, sans aspiration

Réf.: 700952



Action unique, bec de canard (vertical)

> Calvian endo-pen® 18 cm, 2,5 mm, embouts coudés à 70°, sans aspiration


Réf.: 700954



Action unique, similaire aux pinces (horizontal)

> Calvian endo-pen® 18 cm embouts coudés à 45°, sans aspiration

Réf.: 700956

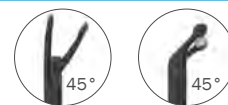

Action unique, similaire aux pinces (horizontal)

> Calvian endo-pen® 18 cm embouts coudés à 15°, 0,7 mm pointe (fine) miniaturisée, sans aspiration

Réf.: 700986



Action unique, similaire aux pinces (horizontal)

> Calvian endo-pen® 18 cm embouts coudés à 15°, 1,2 mm pointe (medium) miniaturisée, sans aspiration,

Réf.: 700987



Action unique, similaire aux pinces (horizontal)

> Calvian endo-pen® 18 cm embouts coudés à 45°, 0,7 mm pointe (fine) miniaturisée, sans aspiration,


Réf.: 700989



Action unique, similaire aux pinces (horizontal)

> Calvian endo-pen® 18 cm embouts coudés à 45°, 1,2 mm pointe (medium) miniaturisée, sans aspiration,


Réf.: 700990

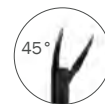

Action unique, bec de canard (vertical)

> Calvian endo-pen® 18 cm embouts coudés à 15°, 0,7 mm pointe (fine) miniaturisée, sans aspiration,

Réf.: 700957

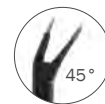

Action unique, bec de canard (vertical)

> Calvian endo-pen® 18 cm embouts coudés à 15°, 1,2 mm pointe (medium) miniaturisée, sans aspiration,

Réf.: 700958



* Les longueurs sont indicatives et peuvent diverger

> Plateau instruments pour Calvian endo-pen® - Dim. ext. 35 x 7 x 5 cm

Réf.: 701778-01



INSTRUMENTS DE RADIOFRÉQUENCE

Aiguilles monopolaires de microdissection ARROWtip™ ø 2,4 mm (de la connexion)

ARROWtip™ microdissection electrodes

Très grande précision, pointe tungstène - Boîte de 2

> Micro aiguille monopolaire droite ARROWtip™
Long. 20 mm Réf.: 360320



> Micro aiguille monopolaire courbe ARROWtip™
Long. 20 mm Réf.: 360321



> Micro aiguille monopolaire courbe 90° ARROWtip™
Long. 20 mm Réf.: 360322



> Micro aiguille monopolaire droite ARROWtip™
Long. 30 mm Réf.: 360325



> Micro aiguille monopolaire courbe 45° ARROWtip™
Long. 20 mm Réf.: 360328



> Micro aiguille monopolaire droite ARROWtip™
Long. 65 mm Réf.: 360340



> Micro aiguille monopolaire droite ARROWtip™
Long. 159 mm Réf.: 360350



> Micro aiguille monopolaire courbe 45° ARROWtip™
Long. 157 mm Réf.: 360352

> Micro aiguille monopolaire courbe 45° ARROWtip™
Long. 207 mm Réf.: 360362

> Électrode anse ø 5 mm (boîte de 5)
Réf.: 360514



INSTRUMENTS DE RADIOFRÉQUENCE

Électrodes monopolaires ø 2,4 mm (de la connexion)

Monopolar electrodes



- > Électrode fine souple (boîte de 5)
Réf.: 360804



- > Électrode spatule, longueur 20 mm (boîte de 5)
Réf.: 360818



- > Électrode spatule, longueur 32 mm (boîte de 2)
Réf.: 360440



- > Électrode spatule "classique", longueur 33 mm (boîte de 2)
Réf.: 360450

- > Électrode spatule pointue, longueur 33 mm (boîte de 2)
Réf.: 360451



- > Électrode anse ø 5 mm (boîte de 5)
Réf.: 360814

- > Électrode anse ø 8 mm (boîte de 5)
Réf.: 360815

- > Électrode anse ø 10 mm (boîte de 2)
Réf.: 360443



- > Électrode fine triangulaire ø 7 mm (boîte de 5)
Réf.: 360811

- > Électrode fine triangulaire ø 9 mm (boîte de 5)
Réf.: 360812



- > Électrode fine losange ø 7 mm (boîte de 5)
Réf.: 360813



- > Électrode anse ø 10 mm, long. 147 mm
> **Pour la gynécologie** Réf.: 360835

- > Électrode anse ø 15 mm, long. 147 mm
> **Pour la gynécologie** Réf.: 360836

- > Électrode anse ø 20 mm, long. 147 mm
> **Pour la gynécologie** Réf.: 360837

- > Électrode anse ø 25 mm, long. 147 mm
> **Pour la gynécologie** Réf.: 360838

Electrodes monopolaires ø 1,6 mm (de la connexion)

Monopolar electrodes



- > Électrode fine (boîte de 5)
Réf.: 360510

- > Électrode fine coudée (boîte de 5)
Réf.: 360511




- > Électrode boule courbe ø 3 mm (boîte de 5)
Réf.: 360521

INSTRUMENTS DE RADIOFRÉQUENCE

Pinces bipolaires SuperGliss® non-stick

Bipolar forceps SuperGliss® non stick

Pinces non collantes à vie - Très haute qualité
Meilleure visibilité grâce aux pointes MicroTip

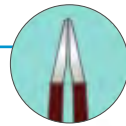

7802435G

Longueur 12 cm

- > Pince SuperGliss® non-stick droite 12 cm
ø 0,2 mm MicroTip Réf.: 7804375G
- > Pince SuperGliss® non-stick droite 12 cm
ø 0,4 mm MicroTip Réf.: 7802375G
- > Pince SuperGliss® non-stick droite 12 cm
ø 0,7 mm MicroTip Réf.: 7802385G
- > Pince SuperGliss® non-stick droite 12 cm
ø 0,7 mm, extr. coudées en bas Réf.: 7802395G
- > Pince SuperGliss® non-stick droite 12 cm
ø 1 mm Réf.: 7802435G



7801545G

Longueur 18,5 cm

- > Pince SuperGliss® non-stick droite 18,5 cm
ø 0,2 mm MicroTip Réf.: 7804545G
- > Pince SuperGliss® non-stick droite 18,5 cm
ø 0,4 mm MicroTip Réf.: 7801545G
- > Pince SuperGliss® non-stick droite 18,5 cm
ø 0,7 mm MicroTip Réf.: 7801525G
- > Pince SuperGliss® non-stick droite 18,5 cm
ø 1 mm Réf.: 7801515G
- > Pince SuperGliss® non-stick droite 18,5 cm
ø 1 mm extr. coudées en bas Réf.: 7801575G



7801755G

Longueur 20 cm

- > Pince SuperGliss® non-stick droite 20 cm
ø 0,2 mm MicroTip Réf.: 7804795G
- > Pince SuperGliss® non-stick droite 20 cm
ø 1 mm Réf.: 7801715G
- > Pince SuperGliss® non-stick droite 20 cm
ø 1 mm extr. coudées en bas Réf.: 7801755G
- > Pince SuperGliss® non-stick droite 20 cm
ø 2 mm extr. coudées en bas Réf.: 7801765G



7802725G

Longueur 23 cm

- > Pince SuperGliss® non-stick droite 23 cm
ø 1,5 mm Réf.: 7802715G
- > Pince SuperGliss® non-stick droite 23 cm
ø 2 mm Réf.: 7802725G



Longueur 28 cm

- > Pince SuperGliss® non-stick droite 28 cm
ø 2,5 mm Réf.: 7802815G



Longueur 18 cm/spéciale adénoïdectomie/polypes

- > Pince SuperGliss® non-stick angulée type Meuser, 8 cm
ø 2 mm Réf.: 7801785G



7801495G

Longueur 15,5 cm baïonnette

- > Pince SuperGliss® non-stick baïonnette 15,5 cm
ø 0,2 mm MicroTip Réf.: 7804495G
- > Pince SuperGliss® non-stick baïonnette 15,5 cm
ø 0,4 mm MicroTip Réf.: 7801495G
- > Pince SuperGliss® non-stick baïonnette 15,5 cm
ø 0,7 mm MicroTip Réf.: 7801485G



7801685G

Longueur 17 cm baïonnette

- > Pince SuperGliss® non-stick baïonnette 17 cm
ø 0,2 mm MicroTip Réf.: 7804695G
- > Pince SuperGliss® non-stick baïonnette 17 cm
ø 0,4 mm MicroTip Réf.: 7801695G
- > Pince SuperGliss® non-stick baïonnette 17 cm
ø 0,7 mm MicroTip Réf.: 7801685G
- > Pince SuperGliss® non-stick baïonnette 17 cm
ø 1 mm Réf.: 7801675G



7821895G

Longueur 20 cm baïonnette

- > Pince SuperGliss® non-stick baïonnette 20 cm
ø 0,2 mm MicroTip Réf.: 7824895G
- > Pince SuperGliss® non-stick baïonnette 20 cm
ø 0,4 mm MicroTip Réf.: 7821895G
- > Pince SuperGliss® non-stick baïonnette 20 cm
ø 0,7 mm MicroTip Réf.: 7821835G
- > Pince SuperGliss® non-stick baïonnette 20 cm
ø 1 mm Réf.: 7821815G
- > Pince SuperGliss® non-stick baïonnette 20 cm
ø 1,2 mm Réf.: 7821845G
- > Pince SuperGliss® non-stick baïonnette 20 cm
ø 1,2 mm extr. coudées en bas Réf.: 7822855G
- > Pince SuperGliss® non-stick baïonnette 20 cm
ø 1,2 mm extr. coudées en haut Réf.: 7822885G
- > Pince SuperGliss® non-stick baïonnette 20 cm
ø 2,0 mm Réf.: 7821825G

INSTRUMENTS DE RADIOFRÉQUENCE



780199SG

Longueur 23 cm baïonnette

- > Pince SuperGliss® non-stick baïonnette 23 cm
ø 0,2 mm MicroTip Réf.: 780499SG

- > Pince SuperGliss® non-stick baïonnette 23 cm
ø 0,4 mm MicroTip Réf.: 780199SG

- > Pince SuperGliss® non-stick baïonnette 23 cm
ø 0,7 mm Microtip Réf.: 780191SG

- > Pince SuperGliss® non-stick baïonnette 23 cm
ø 1 mm Réf.: 780198SG

- > Pince SuperGliss® non-stick baïonnette 23 cm
ø 1,2 mm Réf.: 780192SG

SuperGliss® non stick

SuperGliss® non stick

ELP = Extra Low Profile

Les embouts sont plus courts et plus fins pour une précision améliorée

Les branches sont plus fines et plus effilées pour une meilleure vision



780169SL

Longueur 17 cm

- > SuperGliss® non-stick ELP baïonnette 17 cm
ø 0,2 mm Réf.: 780469SL

- > SuperGliss® non-stick ELP baïonnette 17 cm
ø 0,4 mm Réf.: 780169SL

- > SuperGliss® non-stick ELP baïonnette 17 cm
ø 0,7 mm Réf.: 780168SL

- > Pince SuperGliss® non-stick baïonnette 17 cm
ø 1 mm Réf.: 780167SG

Longueur 20 cm

- > SuperGliss® non-stick ELP baïonnette 20 cm
ø 0,2 mm Réf.: 782489SL

- > SuperGliss® non-stick ELP baïonnette 20 cm
ø 0,4 mm Réf.: 782189SL

- > SuperGliss® non-stick ELP baïonnette 20 cm
ø 0,7 mm Réf.: 782183SL

- > SuperGliss® non-stick ELP baïonnette 20 cm
ø 1 mm Réf.: 782181SL

Longueur 23 cm

- > SuperGliss® non-stick ELP baïonnette 23 cm
ø 0,2 mm Réf.: 780499SL

- > SuperGliss® non-stick ELP baïonnette 23 cm
ø 0,4 mm Réf.: 780199SL

- > SuperGliss® non-stick ELP baïonnette 23 cm
ø 0,7 mm Réf.: 780191SL

- > SuperGliss® non-stick ELP baïonnette 23 cm
ø 1 mm Réf.: 780198SL

Longueur 25 cm

- > SuperGliss® non-stick ELP baïonnette 25 cm
ø 0,2 mm Réf.: 780599SL

- > SuperGliss® non-stick ELP baïonnette 25 cm
ø 0,4 mm Réf.: 780299SL

- > SuperGliss® non-stick ELP baïonnette 25 cm
ø 0,7 mm Réf.: 780291SL

- > SuperGliss® non-stick ELP baïonnette 25 cm
ø 1 mm Réf.: 780298SL



782286SL

Longueur 20 cm, coudé

- > SuperGliss® non-stick ELP baïonnette 20 cm, ø 0,4 mm,
Coudé de 80° vers le haut Réf.: 782386SL

- > SuperGliss® non-stick ELP baïonnette 20 cm, ø 0,4 mm,
Coudé de 80° vers le bas Réf.: 782387SL

- > SuperGliss® non-stick ELP baïonnette 20 cm, ø 0,4 mm,
Coudé de 45° vers le haut Réf.: 782286SL

- > SuperGliss® non-stick ELP baïonnette 20 cm, ø 0,4 mm,
Coudé de 45° vers le bas Réf.: 782287SL



782396SL

Longueur 23 cm, coudé

- > SuperGliss® non-stick ELP baïonnette 23 cm, ø 0,4 mm,
Coudé de 80° vers le haut Réf.: 782396SL

- > SuperGliss® non-stick ELP baïonnette 23 cm, ø 0,4 mm,
Coudé de 80° vers le bas Réf.: 782397SL

- > SuperGliss® non-stick ELP baïonnette 23 cm, ø 0,4 mm,
Coudé de 45° vers le haut Réf.: 782296SL

- > SuperGliss® non-stick ELP baïonnette 23 cm, ø 0,4 mm,
Coudé de 45° vers le bas Réf.: 782297SL

SuperGliss® non stick


SuperGliss® non stick

Pointes filigranes et excentriques avec une extension de 10° vers le haut

zhora



BREVETÉ

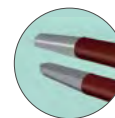

SUPERGRIP



784946SGZ

- > SuperGliss® non-stick Zhora baïonnette 15,5 cm
0,2x5,0 mm, excentrique 10° Réf.: 784946SGZ

- > SuperGliss® non-stick Zhora baïonnette 20 cm
0,2x5,0 mm, excentrique 10° Réf.: 784986SGZ

- > SuperGliss® non-stick Zhora baïonnette 21 cm
0,2x5,0 mm, excentrique 10° Réf.: 784976SGZ

- > SuperGliss® non-stick Zhora baïonnette 24 cm
0,2x5,0 mm, excentrique 10° Réf.: 784996SGZ

INSTRUMENTS DE RADIOFRÉQUENCE

SuperGliss® non stick **TEO**

SuperGliss® non stick

Les embouts sont plus courts et plus fins pour une précision améliorée. Les branches sont plus fines et plus effilées pour une meilleure vision

Longueur 23 cm

> SuperGliss® non-stick par le Dr. TEO, 23 cm
ø 0,5 mm Réf.: 783191SG



> SuperGliss® non-stick par le Dr. TEO, 23 cm
ø 1,0 mm Réf.: 783192SG



> SuperGliss® non-stick par le Dr. TEO, 23 cm
ø 2,0 mm Réf.: 783193SG



> SuperGliss® non-stick par le Dr. TEO, 23 cm, ø 2,0 mm, 60°
5,0 mm coudé vers le haut Réf.: 783195SG



> SuperGliss® non-stick par le Dr. TEO, 23 cm, ø 2,0 mm, 60°
7,0 mm coudé vers le haut Réf.: 783196SG



> SuperGliss® non-stick par le Dr. TEO, 23 cm, ø 2,0 mm, 60°
10,0 mm coudé vers le haut Réf.: 783197SG



Longueur 25 cm

> SuperGliss® non-stick par le Dr. TEO, 25 cm
ø 1,0 mm Réf.: 783275SG



> SuperGliss® non-stick par le Dr. TEO, 25 cm
ø 2,0 mm Réf.: 783276SG



INSTRUMENTS DE RADIOFRÉQUENCE


Cordons silicone bipolaires 2x2 pins

Bipolar silicone cables



Pour Sutter CURIS®

- > Connecteur 2 x 2 mm pins pour To-BiTE™ et Calvian®
Réf.: 370154R

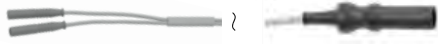


Pour Sutter BM-870 II, Martin, BERCHTOLD, AESCULAP

- > Connecteur 2 x 2 mm pins pour To-BiTE™ et Calvian®
Réf.: 370138R




Pour VALLEYLAB, LAMIDEY, EMC, BOWA

- > Connecteur 2 x 2 mm pins pour To-BiTE™ et Calvian®
Longueur 3 m
Réf.: 370150R

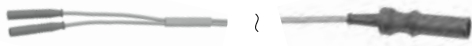


Pour ERBE, STORZ, WOLF

- > Connecteur 2 x 2 mm pins pour To-BiTE™ et Calvian®
Longueur 4,5 m
Réf.: 370130R

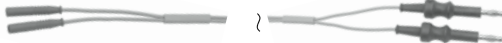

Pour US standard, ERBE ICC International

- > Connecteur 2 x 2 mm pins pour To-BiTE™ et Calvian®
Longueur 4,5 m
Réf.: 370135R

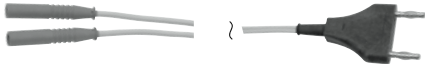

Pour US standard, Olympus Söring ERBE VIO International

- > Connecteur 2 x 2 mm pins pour To-BiTE™ et Calvian®
Longueur 4,5 m
Réf.: 370153R

Manches monopolaires

Monopolar pencils

Pour Sutter CURIS®



- > Manche monopolaire pour électrodes ø 2,4 mm
Cordon 3 m
Réf.: 360704



- > Manche monopolaire pour électrodes ø 1,6 mm
Cordon 3 m
Réf.: 360214

Pour Sutter BM-870 II



- > Manche monopolaire pour électrodes ø 2,4 mm
Cordon 4 m
Réf.: 360218



- > Manche monopolaire pour électrodes ø 1,6 mm
Cordon 4 m
Réf.: 360215


Pour VALLEYLAB, CONMED, BOVIE, BOWA



- > Manche monopolaire pour électrodes ø 2,4 mm
Cordon 4 m
Réf.: 360701

Cordons silicone bipolaires connecteur européen

Bipolar silicone cables

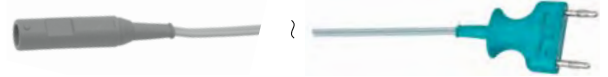

Pour Sutter CURIS®

- > Connecteur de sécurité pour connecteur européen protégé - longueur 3 m
Réf.: 370154L




Pour Sutter BM-870 II, Martin, BERCHTOLD, AESCULAP

- > Connecteur de sécurité pour connecteur européen
Longueur 4,5 m
Réf.: 370138L




Pour VALLEYLAB, LAMIDEY, EMC, BOWA

- > Connecteur de sécurité pour connecteur européen non protégé
Réf.: 370150L

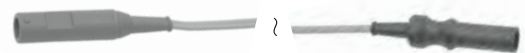

Pour ERBE, STORZ, WOLF

- > Connecteur de sécurité pour connecteur européen
Longueur 4,5 m
Réf.: 370130L

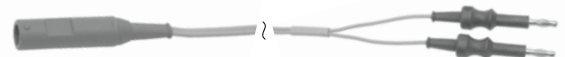

Pour US standard, ERBE ICC International

- > Connecteur de sécurité pour connecteur européen protégé - longueur 4,5 m
Réf.: 370135K

Cordon bipolaire adaptateur

Bipolar adaptor cable



- > Pour pinces To-BiTE™, Calvian® et connexions européennes
- > 1 fiche bipolaire/2 fiches bipolaires rondes
- > Long. 40 cm
- > Réf.: 370100R

INSTRUMENTS DE RADIOFRÉQUENCE

Cordons silicone monopolaires

Monopolar silicone cables



Pour Sutter CURIS®, VALLEYLAB, CONMED, BOVIE, BOWA

- > Connecteur protégé 4 mm pour laparoscopie
- Longueur 3,5 m
- Réf.: 360187



Pour Sutter BM-870 II, MARTIN, BERCHTOLD, AESCULAP, ERBE Série T

- > Connecteur protégé 4 mm pour laparoscopie
- Longueur 3,5 m
- Réf.: 360185



Pour ERBE, STORZ, WOLF

- > Connecteur protégé 4 mm pour laparoscopie
- Longueur 3,5 m
- Réf.: 360186




Chariot "Fuego" pour positionnement du générateur 4 MHz CURIS®

Trolley

- > Réf.: 360900

Plaques neutres, cordons


Patient plates, connecting cables

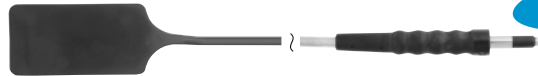

Réutilisable

Pour Sutter CURIS®, BM-870 II

- > Plaque neutre réutilisable, cordon 4 m
- Réf.: 360226

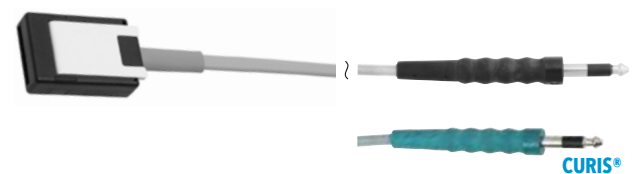

Pour Sutter CURIS®, BM-870 II

- > Cordon pour plaque neutre à usage unique pour BM-870 II longueur 4,5 m
- Réf.: 360236
- > Cordon pour plaque neutre à usage unique pour CURIS®
- Longueur 3 m
- Réf.: 360238



Usage unique

Pour Sutter CURIS®, BM-870 II

- > Plaque neutre à usage unique (pour COA311/ MAT741)
- Boîte de 50 unités
- Réf.: 360222

Adaptateur bipolaire

Adaptor bipolar



- > Adaptateur bipolaire Sutter CURIS®, Valleylab pour cable ERBE
- Réf.: 375030



Valise générateur pour CURIS® ou BM-780 II

Suitcase

- > Réf.: 990110



Cormedica

CORMEDICA SAS
Greenpark – Immeuble A1 - Rue Claude Chappe 38300 Bourgoin-Jallieu
Tél : 04 74 94 34 43 E-mail : contact@cormedica.fr
www.cormedica.fr