

## TRAITER AUSSI BIEN LES BRONCHES QUE LES ALVEOLES

Compresseur pneumatique, l'AirMed 1000 est compact, fiable et d'un excellent rapport qualité / prix, ce qui le rend idéal pour une utilisation à domicile.

Associé à son nébuliseur, il permet une nébulisation rapide et de qualité.

Il est compatible avec tous les produits nébulisables\* sans ajout de liquide physiologique :

- Broncho-dilatateurs : Terbutaline, Salbutamol, Ipratropium
- Anti-inflammatoires : Budésonide, Beclométasone
- Antibiotiques : Tobramycine, Colistine
- Anti-infectieux : Pentamidine
- Fluidificateurs : Melaleuca miridiflora
- Vasodilatateurs : Iloprost
- Mucolytique : Dornase alpha

\* Source : GAT du SPLF - 2011



GARANTIE 2 ANS

Prise en charge de la location et du kit de nébulisation pour chaque patient : tubulure, capsule et masque.

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Poids : 1,38 kg Dimensions : 175 x 112 x 140 mm

#### PERFORMANCES

MMAD : 3,60  $\mu$

% de particules respirables < 5 $\mu$ m : 67%

Débit : 8 L/min

Pression en service : 2 à 3 bar

Volume nébulisé :  $\geq$  0,2 ml / min

Volume résiduel : 1,5 ml

### Présentation du dispositif


Compresseur AirMed 1000 avec :

- bouton M/A
- filtre Entrée air
- cordon d'alimentation
- coupelle de nébulisation
- embout buccal,
- masques enfant et adulte



Les kits de nébulisation comprennent une cuve de nébulisation graduée, une tubulure, 5 filtres à air et, soit un embout buccal, un masque adulte ou un masque enfant, au choix.

# NEBULISEUR PNEUMATIQUE AirMed 1000

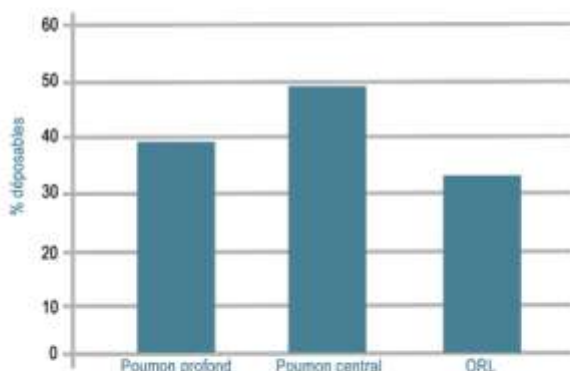

Une étude de l'ANTADIR démontre les performances suivantes :

- l'aérosol produit est caractérisé par un MMAD de  $3,6 \mu\text{m} \pm 0,4\%$  et 67% de particules inférieures à  $5 \mu\text{m}$ .

- à partir d'un volume de 2 ml, le dispositif AirMed 1000 génère  $10\% \pm 1\%$  de la charge en  $4,3 \pm 0,3$  min.

Il convient pour le traitement des bronches et des alvéoles mais aussi pour un usage ORL.

% de déposition par site pulmonaire, d'un aérosol généré par un AirMed 1000

	Code ACL	Code LPPR	Prise en charge
Compresseur AIRMED 1000 : - Location courte durée = 1 semaine - Location longue durée : . de 2 à 64 semaines (dès la 1ère semaine) . plus de 65 semaines (dès la 1ère semaine)			Tarif de location hebdomadaire :
		101C03.11	9,30 €
		101C03.121	4,57 €
		101C03.122	2,74 €
Kit de nébulisation avec masque enfant	702 45 29	101C03.13	12,93 € / pièce
Kit de nébulisation avec masque adulte	702 45 58	101C03.13	12,93 € / pièce
Kit de nébulisation avec embout buccal	667 76 37	101C03.13	12,93 € / pièce

MEDIFLUX

c'est aussi :

les Peak Flow Mini-Wright, Mini-Wright Digital,  
des chambres d'inhalation  
et des spiromètres

**VOTRE CONTACT COMMERCIAL MEDIFLUX**