# **BD Stent**

Prothèse œsophagienne biodégradable BD SX ELLA











Système d'introduction unique

Excellente flexibilité

Marqueurs radio-opaques





#### Caractéristiques de base

## Prothèse oesophagienne biodégradable SX ELLA - BD Stent

BD Stent est destinée aux patients ayant au moins 18 ans et est indiquée pour traiter des sténoses œsophagiennes réfractaires bénignes:

des sténoses œsophagiennes réfractaires (peptiques, caustiques ou anastomotiques) où la thérapie standard à l'aide des dilatations répétées a échoué.

#### Caractéristiques et avantages

- ☑ Système d'introduction PULL olive séparable séparation automatique lors de la libération de la prothèse; système anti-blocage de l'olive; retrait en toute sécurité du système d'introduction.
- ☑ Marqueurs radio-opaques pose précise de la prothèse.
- ☑ Forme anti-migration gorge élargie; taux de migration diminué.
- ☑ L'intégrité et la résistance radiale de la prothèse sont conservées dans les 6 à 8 semaines après l'implantation - dilatation plus longue par rapport aux procédés standards.
- ☑ Matériel biodégradable Polydioxanon la désintégration de la prothèse commence généralement entre 11 à 12 semaines après l'implantation; l'extraction ultérieure n'est pas nécessaire.
- ☑ Déroulement de la compression simple dispositif de compression fourni.

#### **Autres informations**

La prothèse doit être comprimée dans l'introducteur immédiatement avant l'implantation.

Système d'introduction d'un diamètre de 6 mm/9,4 mm (18 F/28 F), disponible en longueur standard de 75 cm.


Il est recommandé d'utiliser un fil-guide très rigide d'un diamètre de 0,035" (0,89 mm) et d'une longueur d'au moins 220 cm.









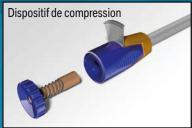







 van Boeckel PG, Vleggaar FP, Siersema PD. A comparison of temporary self-expanding plastic and biodegradable stents for refractory benign esophageal strictures. Clin Gastmenterol Hepatol. 2011;9(8):653-9



### **Dimensions**

Numéro REF	Diamètre de la prothèse [mm]	Diamètre de la gorge de la prothèse [mm]	Longueur nominale de la prothèse [mm]
019-10A-23/18/23-060	18	23	60
019-10A-23/18/23-080			80
019-10A-23/18/23-100			100
019-10A-25/20/25-060	20	25	60
019-10A-25/20/25-080			80
019-10A-25/20/25-100			100
019-10A-28/23/28-060	23	28	60
019-10A-28/23/28-080			80
019-10A-28/23/28-100			100
019-10A-31/25/31-060	25	31	60
019-10A-31/25/31-080			80
019-10A-31/25/31-100			100
019-10A-31/25/31-135			135



DISTRIBUTEUR:

Leufen Medical sarl Z.I. Athélia III 1058, Voie Antiope F — 13600 La Ciotat

Fabricant:

ELLA-CS, s.r.o.

Milady Horakove 504/45, Trebes 500 06 Hradec Kralove, République tchèque

Tel.: +420 495 279 111 Fax: +420 495 265 655 E-mail: info@ellacs.eu URL: www.ellacs.eu