

FICHE TECHNIQUE

CPK Compress-2

Système de compression à 2 couches

Classification (RD1591/2009): Classe I

N° Organisme notificateur CE: -

Fabricant: FARMABAN S.A.



CODE	TAILLE (Valeurs nominales)	CODE EAN 13	QML
1246	18 - 25 cm	8 4280 12 51246 5	8
1247	25 - 32 cm	8 4280 12 51247 2	8

1. COMPOSITION DU PRODUIT

Le kit CPK compress-2 est composé par:

Code	Quantité	Élément	Mesures
1246	1	Bandage élastique de rembourrage	10 cm x 6,2 m
	1	Bandage élastique cohésif	10 cm x 5,5 m
1247	1	Bandage élastique de rembourrage	10 cm x 8,13 m
	1	Bandage élastique cohésif	10 cm x 7,5 m

Le bandage élastique de rembourrage (première couche) est composé de:

- ❑ Tissu élastique longueur, de composition: 60% coton, 36% viscose, 3% polyamide et 1% élasthanne.
- ❑ Sachet de polypropylène transparent.

Le bandage élastique cohésif (deuxième couche) est composé de:

- ❑ Tissu élastique de longueur en coton 100%.
- ❑ Masse cohésive sans latex en une fine couche appliqué uniformément sur la surface du bandage.
- ❑ Rouleau central en carton.
- ❑ Sachet en polypropylène transparent micro-perforé.

2. CONTIENNEMENT

2.1 Emballage unitaire

- ❑ Étui en cellulose avec mode d'emploi.

2.2 Emballage de présentation ou vente

- ❑ Boîte en carton ondulé.

3. DESCRIPTION

Le kit CPK compress-2 c'est un système de compression à deux couches conçu pour obtenir une compression thérapeutique continue. Contient un bandage de rembourrage élastique cohésif et un bandage élastique cohésif de compression forte et traction courte, sans latex.

4. PROPRIETES

Le bandage de rembourrage c'est un bandage doux, agréable à la peau, adaptable, qui absorbe les fluides et redistribue la pression pour éviter des lésions aux proéminences osseuses.

S'applique avec une tension minimum de manière similaire à un autre bandage de rembourré (couvrez le 50%) en offrant une légère compression à la cheville.

Le bandage cohésif de traction courte a leur extensibilité limité et garantit la compression thérapeutique approprié. Les indicateurs de pression imprimés sur le bandage facilitent que la tension appliquée au bandage soit la prévue. Les bandages ont imprimés le mot *Strong* et le numéro 40 pour faciliter l'attache sur la jambe droite ou gauche, et obtenir différents pressions selon le choix du professionnel médical.



Si on applique une attache du 50% suivant le numéro 40, nous obtiendrons une pression de 40 mm Hg en repos. Si au contraire nous avons besoin de plus pression, nous appliquerons une attache du 66% (2/3) suivant le mot *Strong* et nous obtiendrons une pression de 60 mm Hg en repos. Le bandage cohésive de la deuxième couche et la tension appliquée garantissent une compression pendant 7 jours et en conséquence garantisse le traitement et en offrant une meilleure qualité de vie au patient.

5. INDICACIONTS

CPK compress-2 est indiqué pour le traitement des ulcères veineux des jambes avec chevilles de diamètre entre 18-25 cm et 25-32 cm et pour la réduction d'œdèmes chroniques veineux.

6. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser chez patients avec des ulcères artérielles et maladies artérielles. CPK compress-2 n'est pas recommandé quand l'index de pression cheville-brachial, mesuré par ultrasons Doppler, est au-dessous de 0,8.

7. PRECAUTIONS

Avant la prescription, il est nécessaire d'assurer que l'index de pression cheville-trachéal est supérieure à 0,8.

Mesurer le diamètre de la cheville pour confirmer qu'elle est supérieure à 18 ou 25 cm (rembourrée). S'assurer d'appliquer le kit propre. S'il existe diabète, insuffisance cardiaque déséquilibrée ou maladies micro-vasculaires avancés, le kit CPK compress-2 doit être utilisé uniquement sur prescription facultative, avec monitoring et après le traitement adéquat.

Peut apparaître de la douleur si l'application de cette technique n'est pas l'adéquante, il est donc recommandé de suivre correctement le mode d'emploi.

Si le patient développe de la douleur, pâleur, refroidissement ou l'assouplissement des parts extrémités du bandage, il faut le retirer immédiatement.

S'il y a des problèmes, consultez au médecin.

Produit à usage unique.

8. PEREMPTION

3 ans à partir de la date de fabrication. A conserver dans un endroit frais (entre 5°C et 30°C) et sec dans son emballage original.