

## FICHE TECHNIQUE


### CPK Compress LS-2

#### Système de compression à 2 couches

Classification (RD1591/2009) : Classe I

N° Organisme notificateur CE : -

Fabricant : FARMABAN S.A.

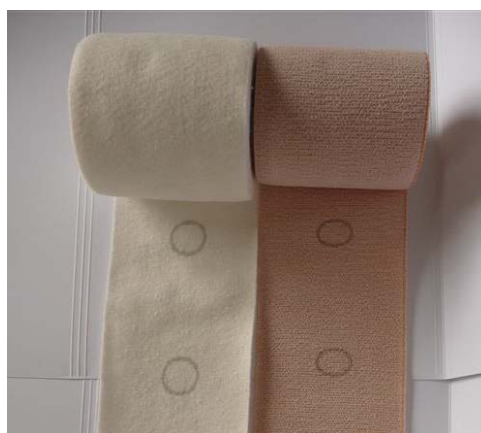

| CODE | TAILLE<br>(Valeurs nominales) | CODE EAN 13       | QML |
|------|-------------------------------|-------------------|-----|
| 1248 | 18 - 25 cm                    | 8 4280 12 51248 9 | 8   |
| 1249 | 25 - 32 cm                    | 8 4280 12 51249 6 | 8   |

### 1. COMPOSITION DU PRODUIT

Le kit de CPK Compress LS-2 est composé par :

| Code | Quantité | Élément                          | Mesures        |
|------|----------|----------------------------------|----------------|
| 1248 | 1        | Bandage élastique de rembourrage | 10 cm x 6,2 m  |
|      | 1        | Bandage élastique cohésif        | 10 cm x 7,5 m  |
| 1249 | 1        | Bandage élastique de rembourrage | 10 cm x 8,13 m |
|      | 1        | Bandage élastique cohésif        | 10 cm x 10,5 m |

Le bandage élastique de rembourrage (première couche) est composé de :

- Tissu élastique dans la longueur de composition : 60% coton, 36% viscosse, 3% polyamide et 1% élasthanne.
- Rouleau guide en carton.

Le bandage élastique cohésif (deuxième couche) est composé de :

- Tissu élastique longueur de composition : 51% coton, 47% polyamide et 2% polyuréthane.
- Masse cohésive sans latex en une fine couche appliquée uniformément sur les deux plis de la surface du bandage.
- Rouleau guide en carton.
- Sachet en polypropylène transparent micro-perforé.

## **2. CONDITIONNEMENT**

### **2.1 Emballage unitaire**

- Etui en cellulose avec notice du mode d'emploi.

### **2.2 Emballage de présentation ou de vente**

- Boîte en carton ondulé.

## **3. DESCRIPTION**

Le kit CPK Compress LS-2 est un système de compression de deux couches conçu pour obtenir une compression thérapeutique continue. Contient un bandage de rembourrage élastique compressif et un bandage élastique cohésif de traction longue, sans latex.

## **4. PROPRIÉTÉS**

Le bandage de rembourrage est un bandage doux, agréable à la peau, adaptable, qui absorbe les fluides et redistribue la pression pour éviter des lésions aux proéminences osseuses. S'applique avec une tension minimum de manière similaire à un autre bandage de rembourré (couvrir le 50%), en

offrant une légère compression sur la cheville. Les indicateurs imprimés sur le bandage facilitent son application.

Le bandage cohésif de traction longue garantit la compression thérapeutique appropriée (40 mm Hg en repos). Les indicateurs de pression imprimés sur le bandage facilitent que la tension appliquée sur le bandage soit toujours celle attendue.

Le bandage cohésif de la deuxième couche et la tension appliquée garantissent une compression pendant 7 jours, ce qui en conséquence améliore le traitement et procure une meilleure qualité de vie au patient.

CPK Compress LS-2 est sûr, facile à appliquer et procure un effet massage durant la marche. Il améliore le retour veineux et réduit l'œdème.

## **5. INDICATIONS**

CPK Compress LS-2 est indiqué pour le traitement des ulcères veineux des jambes avec chevilles de diamètre entre 18-25 cm et 25-32 cm, œdèmes veineux et lymphœdèmes.

## **6. CONTRE-INDICATIONS**

Ne pas utiliser chez les patients avec des ulcères ou maladies artériels.

CPK Compress LS-2 n'est pas recommandé quand l'index de pression cheville-brachial, mesuré par ultrasons Doppler, est au-dessous de 0,8.

De même que pour les patients atteints de micro angiopathie diabétique, de phlébite ischémique, de thrombose septique et les ulcérations dues aux infections.

## **7. PRECAUTIONS**

Avant la prescription, il est nécessaire d'assurer que l'index de pression cheville-brachial est supérieure à 0,8.

Mesurer le diamètre de la cheville pour confirmer qu'elle est supérieure à 18 ou 25 cm (rembourré). S'assurer d'appliquer le kit propre.

S'il existe diabète, insuffisance cardiaque déséquilibrée ou maladies micro-vasculaires avancés, le kit CPK Compress LS-2 ne doit être utilisé que sur prescription médicale, sous monitoring surveillé et après le traitement adéquat.

En cas de dermatite dans la zone péri-ulcéreuse, traiter l'infection avant de commencer le traitement avec le système de compression.

En cas d'ulcères d'origine rare (vascularite, hémopathie, pyodermie gangrenosum, ...), le système de compression ne doit être utilisé que sous la supervision d'un spécialiste.

Si l'application de la technique est inadéquate, une douleur peut apparaître, pour cette raison les instructions d'utilisation doivent être suivies correctement.

Si le patient développe des douleurs, une pâleur, un refroidissement ou un engourdissement des extrémités des membres du bandage, il doit être retiré immédiatement.

Si les douleurs persistent, consultez votre médecin.

Produit médical à usage unique.

## **8. PEREMPTION**

3 ans stockés à partir de la date de fabrication. Conserver dans un endroit frais (entre 5°C et 30°C) et sec dans son emballage d'origine.